



# Microlet<sup>®</sup>2

PISTOLAITE

**NYT** Pehmeät silikonipinnoitetut lansetit!

**Käyttökohteet:** sormenpästä, kämmenestä ja käsivarresta tapahtuvaan näytteenottoon

## NÄYTTEENOTTOON SORMENPÄSTÄ JA VAIHTOEHTOISISTA PISTOPAIKOISTA

Bayerin MICROLET<sup>®</sup>2 -pistolaite on helppokäyttöinen pistolaite, jossa on uusi lansetin irrotusmekanismi. Ergonomisen muotoilun ansiosta voit pitää pistolaitetta tukevasti kapillaariverinäytettä ottaessasi. Käytä Bayerin MICROLET<sup>®</sup> -lansettia yhdessä MICROLET<sup>®</sup>2 -pistolaitteen kanssa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Käytä säädettävää HARMAATA kärkikappaletta sormenpästä otettaviin kokeisiin. Käytä KIRKASTA kärkikappaletta kokeen ottamiseksi vaihtoehtoisesta pistopaikasta kuten kämmenestä tai käsivarresta. Mistä tahansa muusta paikasta otettavaa koetta varten käytä MICROLET VACULANCE -pistolaitetta. Katso lisätietoja mittarisi käyttöohjeesta ennen vaihtoehtoisesta paikasta otettavaa koetta. Oppaassa on tärkeää tietoa mittarillesi soveltuvista näytteenottopaikoista. Vaihtoehtoisen pistopaikan koetta suositellaan vain, kun näyte otetaan kaksi tuntia ruokailun, diabeteslääkityksen tai fyysisen harjoituksen jälkeen.

## TÄRKEÄÄ: Näyte tulee ottaa sormenpästä:


- Jos verensokeri on matala (hypoglykemia).
- Kun verensokeri vaihtelee nopeasti (ruoan, insuliiniannoksen tai liikunnan jälkeen).
- Jos et tunnista hypoglykemian oireita
- Jos vaihtoehtoisesta pistopaikasta otettu näyte antaa tuloksen, joka ei täsmää omien tuntemusten kanssa.
- Sairauden tai stressin aikana.
- Jos ajat autoa tai käytät koneita.

**Kysy neuvoa vaihtoehtoisten pistopaikojen käytöstä omalta diabeteshoitajaltasi.**



**MAHDOLLINEN TARTUNTA-VAARA**

- Käytä MICROLET2 -pistolaitetta vain yhdellä henkilöllä.
- Käytä jokaiseen testiin uutta MICROLET -lansettia. Käytetty lansetti ei enää ole steriili ja voi levittää infektioita. Kaikki ihmisveren kanssa kosketukseen joutuvat välineet voivat levittää virussairauksia myös puhdistuksen jälkeen.

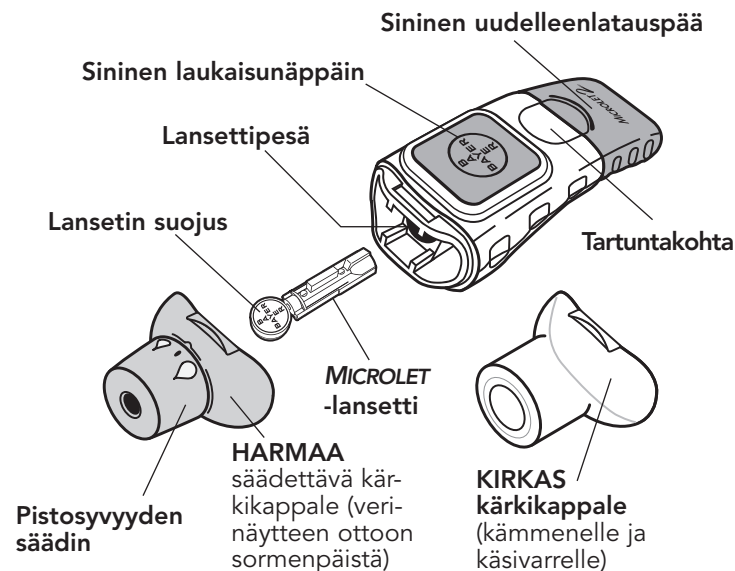






## MICROLET2 -PISTOLAITTEEN KÄYTTÖ

**1. Näytteenottoaika.** Pese kädet ja pistokohta saippualla ja lämpimällä vedellä. Huuhtelee ja kuivaa perusteellisesti.

**2. Irrota kärkikappale.** Tartu MICROLET2 -pistolaitteeseen ja paina **peukalosyvennystä** kuvan kaksi mukaisesti. Tartu toisella kädellä **pistosyvyyden säätimeen** ja irrota kärkikappale vetämällä ylhäältä alaspäin.

**3. Ota MICROLET -lansetti ja kierrä** lansetin suojusta ¼-kierrosta, mutta älä irrota sitä vielä. Käytä aina MICROLET-lansetteja, jotta varmistat laitteen toimivuuden.


**4. Paina lansetti** lujasti lansettipesään. Työnnä lansettia napsahduksen jälkeenkin, kunnes se pysähtyy kokonaan. **Kierrä suojusta irti** ja säästä se käytetyn lansetin hävittämistä varten.

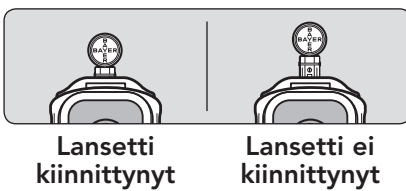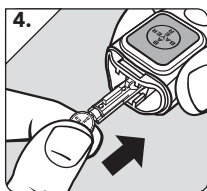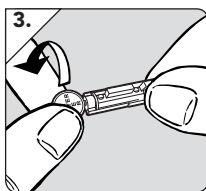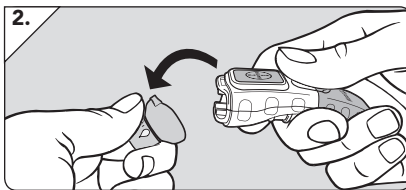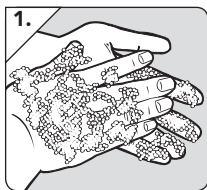


Lansetti kiinnittynyt

Lansetti ei kiinnittynyt

**HUOMAUTUS:** Jos haluat ladata pistolaitteen uudelleen, vedä ja työnnä uudelleenlatauspäätä kuvan osoittamalla tavalla, kunnes kuulet napsahduksen.

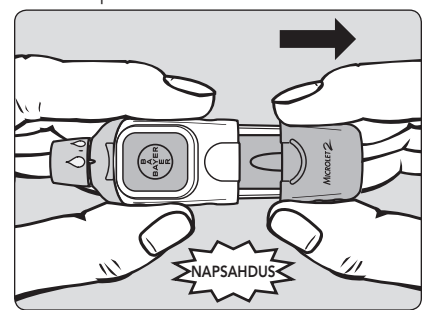

Uudelleenlataus kahdella kädellä

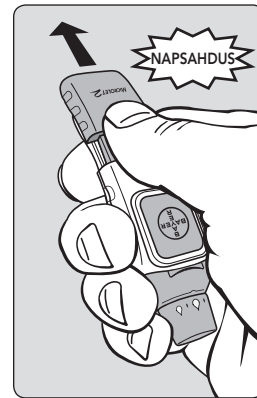


Uudelleenlataus yhdellä kädellä

## VERINÄYTTEEN OTTAMINEN


### NÄYTTEEN OTTO SORMENPÄSTÄ

Käytä säädettävää HARMAATA kärkikappaletta!

**1. Kiinnitä HARMAA säädettävä kärkikappale MICROLET2 -pistolaitteeseen. Älä käytä KIRKASTA kärkikappaletta sormenpäihin.**

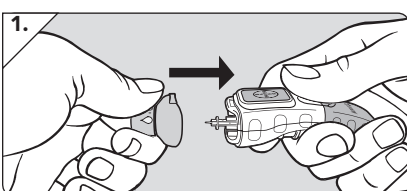


**2. Valitse mikä tahansa viidestä pistosyvyydestä pistosyvyyden säädintä kiertämällä.** Mitä pienempi pisara, sitä matalampi pistosyvyys. Mitä voimakkaammin painat laitetta pistokohtaa vasten, sitä syvemmän piston saat.

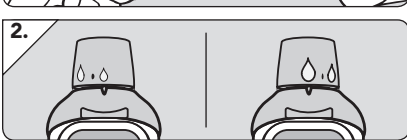


Matala pisto

Syvä pisto

**3. Aseta MICROLET2 -laite tukevasti pistokohtaa vasten ja paina sinistä laukaisunäppäintä.** Pisto saattaa tuntua miellyttävämmältä sormenpäiden sivuilla.

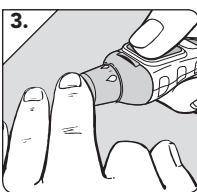

**4. Helpotat veripisaran muodostumista** odottamalla muutaman sekunnin ja hieromalla sitten kättä ja sormea pistokohtaa kohti. Älä purista pistokohdan aluetta.

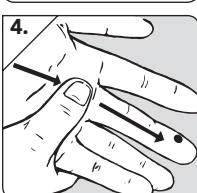


**5. Ota näyte liuskalle** heti veripisaran muodostuttua.

**6. Pyyhi pistokohta** puhtaalla ja kuivalla, imukykyisellä paperipyyhkeellä. **Paina pyyhettä** pistokohtaa vasten, kunnes verenvuoto tyrehtyy.

## VERIKOKEEN OTTO VAIHTOEHTOISISTA NÄYTTEENOTTOPAIKOISTA


**1. Kiinnitä KIRKAS kärkikappale MICROLET2 -pistolaitteeseen**

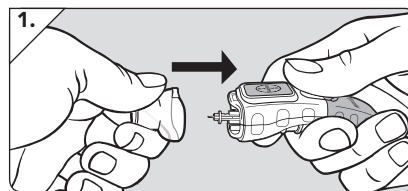


Käytä KIRKASTA kärkikappaletta!

**Jos otat näytteen kämmenestä —**

**2. Valitse pistokohta** kämmenen lihaksikaalta alueelta. Vältä suonia, karvoja, luomia, luita ja jänteitä.

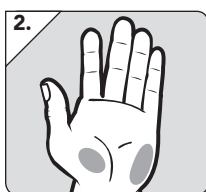

**3. Paina KIRKAS kärkikappale tukevasti pistokohtaa vasten ja paina sinistä laukaisunäppäintä. Paina tasaisesti** kunnes kärkikappaleen alle muodostuva veripisara on riittävän suuri mittarillesi. Katso ohjeita mittarin käyttöohjeista.

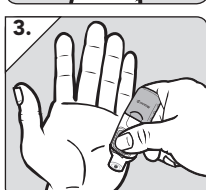

**4. Nosta pistolaite suoraan ylöspäin** ja pois iholta siten, että veri ei lähde valumaan.


**5. Ime veripisara** verensokeriliuskalle 20 sekunnin sisällä pistoksesta.

**Älä testaa verinäytettä, jos tuloksena on:** • juoksevaa verta • hyytynyt veripisara • veren seassa on kirkasta nestettä

**6. Pyyhi pistokohta** puhtaalla ja kuivalla, imukykyisellä paperipyyhkeellä. **Paina pyyhettä** pistokohtaa vasten, kunnes verenvuoto tyrehtyy.

**Jos otat näytteen käsivarresta —**


**2. Valitse pistokohta** käsivarren lihaksikaasta kohdasta. Hiero käsivartta voimakkaasti, kunnes se tuntuu lämpimältä. Vältä suonia, karvoja, luomia, luita ja jänteitä.

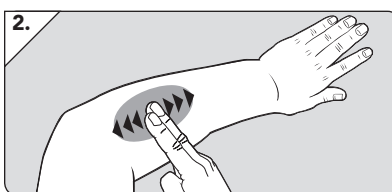

**3. Paina KIRKAS kärkikappale** pistokohtaa vasten ja paina sinistä laukaisunäppäintä.




**Paina pistolaitetta ihoa vasten lisäten ja vähentäen painetta** pumpaamalla ylös ja alas 2-3 kertaa nostamatta laitetta iholta. **Paina tasaisesti** kunnes kärkikappaleen alle muodostuva veripisara on riittävän suuri mittarillesi. Katso ohjeita mittarin käyttöohjeista.

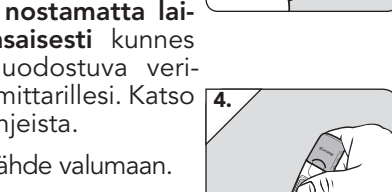


## LANSETIN IRROTTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN

Hävitä aina käytetty lansetti asianmukaisesti välttääksesi vahinkopistot ja tartuntavaaran. Käytä jokaisella testauskerralla uutta MICROLET-lansettia. **Kertakäyttöinen** (ⓧ).

**1. Poista kärkikappale varovaisesti.** Pidä kiinni pistosyvyyden säätimestä ja irrota kärkikappale.

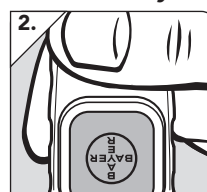

**2. Aseta lansetin kiinnityksen yhteydessä säästämäsi suojusta tasaiselle alustalle Bayer-logo alaspäin.** Työnnä MICROLET2 -laitteesta kiinni oleva käytetty lansetti suojusta keskiönsä.

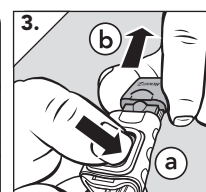


**3. Pidä laitetta** teräville esineille tarkoitetun säiliön (esim. tyhjä kannellinen muovipullo). Merkitse säiliö asianmukaisesti ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

**Paina sinistä laukaisunäppäintä (a), ja vedä vakaasti sinistä uudelleenlatauspäätä (b) vastuksen yli, jolloin lansetti putoaa säiliöön.**

**4. Aseta kärkikappale takaisin paikoilleen.**

## MICROLET2 -PISTOLAITTEEN JA KÄRKIKAPPALEEN PUHDISTUS

Puhdista MICROLET2 -pistolaite aina käytön jälkeen veden ja miedon puhdistusaineen liuoksella tai liuoksella, jossa on 90% vettä ja 10% valkaisuainetta. Kostuta paperipyyhke liuoksella. **Tärkeää: Älä kostuta pyyhettä liian märäksi. Irrota kärkikappale. Puhdista laitteen pinta** sekä kärkikappaleen sisä- ja ulkopinnat. **Pyyhi** laite paperipyyhkeellä kuivaksi ennen käyttöä. **Aseta** kärkikappale takaisin paikoilleen.

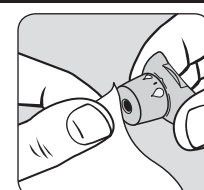

## ASIAKASPALVELUN YHTEYSTIEDOT

Jos tarvitset neuvoja tai sinulla on verensokerimittaria koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Bayer Diabetes Care -asiakaspalveluun numerossa 0800-172 227.

LANCING DEVICE = Säädettävä pistolaite LANCETS = Lansetit STERILE R = Steriili ⓧ = Kertakäyttöinen  
AST = Verikokeen otto Vaihtoehtoisista Näytteenottopaikoista

U.S. Pat. No. 6,451,040 ja sitä vastaavat ulkomaalaiset patentit.  
Muuta patenteja haettu.  
Bayer, Bayer-risti, MICROLET ja MICROLET VACULANCE ovat Bayerin tavaramerkkejä.

Bayer HealthCare  
Bayer Oy, Diabetes Care  
PL 73, 02151 Espoo  
Puh. 020 785 8269, 020 785 8268  
Fax 020 785 8215, www.bayerdiabetes.fi

Bayer Consumer Care AG  
Postfach  
4002 Basel, Switzerland



0088

Bayer

81064297 Rev. 6/08